

## **BLUgel®**

Natriumhyaluronat 0,30 %

### **Augentropfen**

#### **BESCHREIBUNG**

**BLUgel®** ist ein steriler, viskoelastischer, klarer Schutzfilm für die Hornhaut. **BLUgel®** schützt und befeuchtet die Augenoberfläche und macht sie gleitfähig. Dadurch bewirkt es lang anhaltende Erleichterung bei Beschwerden in Zusammenhang mit

- mechanischer Beanspruchung, z. B. beim Tragen harter oder weicher Kontaktlinsen oder bei diagnostischen Eingriffen am Auge,
- bei Umweltstress, z. B. durch Klimaanlage, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung, beispielsweise durch Zigarettenrauch, oder bei
- Sehstress durch intensives Sehen, z. B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder bei langen Autofahrten.

#### **ANWENDUNG**

Das Behältnis ist mit einem Sicherheitsring versiegelt. Öffnen Sie die Flasche durch Drehen der Verschlusskappe nach links. Beugen Sie den Kopf leicht nach hinten, blicken Sie nach oben und ziehen das Unterlid etwas vom Auge ab. Halten Sie die Flasche mit der Öffnung nach unten und drücken Sie die Flasche vorsichtig bis ein Tropfen in den Bindehautsack fällt.

Vermeiden Sie jegliche Berührung des Tropfaufsatzes mit dem Auge oder den Händen. Nach dem Eintropfen schliessen Sie langsam das Auge. Die Flasche nach dem Gebrauch wieder verschliessen.

Wenn Sie anhaltende Probleme haben, besprechen Sie diese bitte mit Ihrem Augenarzt! **BLUgel®** ist auch für Kontaktlinsenträger geeignet.

#### **ZUSAMMENSETZUNG**

1 ml enthält: Natriumhyaluronat (0,30%), N-Hydroxymethylglycinat 0,02 mg, Natriumedetat, in pH 7,2 gepufferter isotonischer Lösung.

#### **PACKUNGSGRÖSSE**

Verkaufseinheit: Flasche 1 x 10 ml.

#### **VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE**

- Nicht verwenden bei beschädigtem Behältnis.

- Wegen des Kontaminationsrisikos Kontakt mit der Tropferöffnung vermeiden.
- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Nicht gleichzeitig zusammen mit Augenarzneimitteln in das Auge eintropfen.
- Nicht an infizierten Augen anwenden.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfalldatums. Dieses finden Sie auf dem Etikett und der Faltschachtel. Nach Anbruch nicht länger als 30 Tage verwenden.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### LAGERUNG

Bei 2°C - 25° C lagern. Vor Frost schützen.

 Chargen-Nummer und  "verwendbar bis" sind auf dem Etikett und der Faltschachtel aufgedruckt.

 aseptische Herstellung

 Gebrauchsanweisung beachten

 Lagerungstemperatur

 Hersteller:  
Penta Arzneimittel GmbH  
Werksstraße 3  
D-92551 Stulln  
Germany

Vertrieb:  
Pharma Stulln GmbH  
Werksstraße 3  
D-92551 Stulln  
Germany