

Schneller  
Kühleffekt bei  
Jucken, Brennen  
und Reizungen

# HemoClin

## Gel zur Anwendung bei Hämorrhoidalleiden und Analbeschwerden

- **Schneller Kühleffekt bei Jucken, Brennen und Reizungen**
- **Beugt dem Wiederauftreten von Hämorrhoidalleiden und Analbeschwerden vor**
- **Pflegt die Haut und unterstützt den natürlichen Heilungsprozess**

**Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch von HemoClin vollständig durch. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf. Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.**

### INHALT DER GEBRAUCHSANWEISUNG

Wann wird HemoClin eingesetzt?

Was enthält das HemoClin Gel?

Was bewirken die Inhaltsstoffe?

Was sollten Sie wissen, bevor Sie HemoClin anwenden?

Wann und wie sollten Sie HemoClin anwenden?

Wie sollten Sie HemoClin aufbewahren?

Was enthält eine Packung?

Kontaktinformationen

### Wann wird HemoClin eingesetzt?

HemoClin wird zur Behandlung von Analbeschwerden eingesetzt und lindert Symptome wie z.B. Jucken, Reizungen und Brennen, die oft im Zusammenhang mit Hämorrhoidalleiden auftreten. Dabei behandelt HemoClin Analbeschwerden und beugt gleichermaßen deren Entstehung vor.

### Was enthält das HemoClin Gel?

HemoClin enthält 30g eines Gels, das auf dem Bio-Active 2QR-Komplex basiert, welcher aus der Aloe Barbadensis Pflanze gewonnen wird. HemoClin enthält kein Parfüm und keine Bestandteile tierischer Herkunft.

### Was bewirken die Inhaltsstoffe?

HemoClin ist wirksam in der Vorbeugung und Behandlung von Analbeschwerden wie z.B. Jucken, Reizungen und Brennen. Das Bio-Active Gel 2QR hemmt schädliche Mikroorganismen und unterstützt die natürliche Heilung unter positiver Beeinflussung der Gewebeumgebung. HemoClin führt ferner zu einer spürbaren Gleitwirkung und erleichtert somit den Stuhlgang.

### Was sollten Sie wissen, bevor Sie HemoClin anwenden?

HemoClin enthält keine aggressiven Inhaltsstoffe. Bisher sind unter der Anwendung von HemoClin keine unerwünschten Nebenwirkungen bekannt geworden.

Während der Anwendung von HemoClin sind bislang keine Wechselwirkungen mit anderen Therapien bekannt geworden.

Wenden Sie HemoClin bitte nicht im Falle einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der genannten Inhaltsstoffe an.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie fortwährend Beschwerden mit Hämorrhoiden oder starke Blutungen haben.

### Wann und wie sollten Sie HemoClin anwenden?

- Zur Behandlung von Analbeschwerden (wie z.B. Jucken, Reizungen und Brennen): Tragen Sie HemoClin mindestens zweimal täglich in ausreichender Menge in und um den After über einen Zeitraum von zwei Wochen oder bei Bedarf auf.
- Zur Vorbeugung von Hämorrhoidalleiden und Analbeschwerden: Wir empfehlen HemoClin vor und nach dem Stuhlgang in und um den After aufzutragen.

Sie können HemoClin mit dem Finger oder mit dem beiliegenden Applikator auftragen. Drehen Sie dazu den Applikator auf die Tube und führen Sie diesen in den After ein. Drücken Sie dann vorsichtig auf die Tube bis die gewünschte Gel-Menge appliziert wurde. Reinigen Sie den Applikator anschließend, indem Sie ihn abschrauben und unter warmem Wasser ausspülen. Verschließen Sie die Tube mit der Verschlusskappe, um ein Austrocknen zu verhindern.

HemoClin sollte in einer Behandlungsperiode grundsätzlich nicht länger als 30 Tage angewendet werden.

### Wie sollten Sie HemoClin aufbewahren?

HemoClin sollte bei Raumtemperatur an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Bitte wenden Sie HemoClin nicht mehr nach Ablauf des aufgedruckten Haltbarkeitsdatums an.


### Was enthält eine Packung?

- 1 Tube mit 30g Gel
- 1 Applikator
- 1 Gebrauchsanweisung

### Kontaktinformationen

Vertrieb in Deutschland:  
Paracelsia Pharma GmbH  
Deutsche Chefaro Pharma GmbH  
45725 Waltrop

### Hersteller:

 You Medical  
Van Breestraat 107BC  
1071 ZJ Amsterdam  
The Netherlands

Bei Fragen zu HemoClin wenden Sie sich bitte an den Vertreter.

HemoClin Gel ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß 93/42/EWG.

CE 0086