



Inhalierhilfe-ratiopharm[®] N

Lieber Patient,

bitte beachten Sie bei der Anwendung der *Inhalierhilfe-ratiopharm[®] N* auf die richtige Handhabung:

- Dosieraerosol gut schütteln.
- Schutzkappe abnehmen und auf das passende Mundstück der Inhalierhilfe aufsetzen.
- Dosieraerosol in die Inhalierhilfe stecken, Sprühstoß auslösen.

- Schutzkappe abnehmen und tief ausatmen.
- Mundstück mit den Lippen fest umschließen und ruhig einatmen.
- Atem etwa 10 Sekunden anhalten.

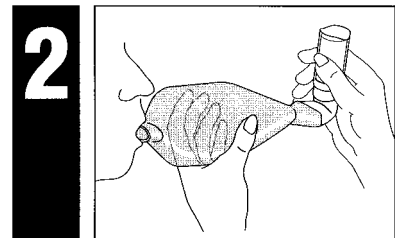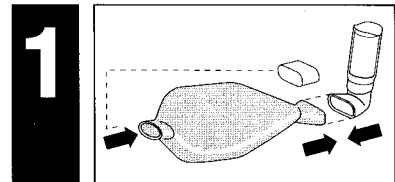

Wurden mehrere Sprühstöße verordnet, Vorgang wiederholen.

Die Inhalierhilfe wurde aus Polyethylen hergestellt,
ist umweltneutral und recyclebar.

Gute Besserung
Ihre ratiopharm