

Rosidal[®] Lymphsets

Mehr-Komponenten-Lymphsets



Inhalt des Lymphsets 2

Anwendungsbereiche

für professionelle lymphologische Kompressionsverbände am Bein oder am Arm

Eigenschaften

- hohe Therapiesicherheit
- effektiv und wirtschaftlich durch Wiederverwendbarkeit der Polster- und Kompressionsbinden (Rosidal soft, Rosidal K)
- hohe, dauerhafte Qualität
- verbrauchsfertig und handlich im Set kombiniert

Produktzusammensetzung

variiert je nach Set:

- tq Schlauchverband
- Mollelast Binde
- Komprex Schaumgummi Binde
- Cellona Synthetikwatte
- Rosidal soft Binde
- Rosidal K Binde
- Idealbinde

Hinweis

Rosidal soft und Rosidal K 50-mal waschbar bei 95 °C

Rosidal® Lymphsets

Mehr-Komponenten-Lymphsets

Rosidal® Lymphset

Lymphset 1 Bein klein	Lymphset 2 Bein groß	Lymphset 3 Arm klein	Lymphset 4 Arm groß	Lymphset 5 Bein klein	Lymphset 6 Bein groß	Ver- ordnungs-
REF 59 795 PZN 066 676 2	REF 59 796 PZN 066 677 9	REF 59 797 PZN 066 678 5	REF 59 798 PZN 066 679 1	REF 16 838 PZN 105 948 4	REF 16 839 PZN 105 949 0	hinweise EV
Set-Bestandteile: tg® Schlauchverband Hautschutz (Hygiene!) unter dem entstauenden Kompressionsverband.						
Größe 7 (1x)	Größe 9 (1x)	Größe 5 (1x)	Größe 7 (1x)	Größe 9 (1x)	Größe 9 (1x)	
Mollelast® Binde Angenehm weiche, sehr elastische Fixierbinde zur Kompression von Fingern und Zehen beim lymphologischen Kompressionsverband.						
4 cm x 4 m (20x)	4 cm x 4 m (20x)	4 cm x 4 m (20x)	4 cm x 4 m (20x)	4 cm x 4 m (20x)	6 cm x 4 m (20x)	
Komprex® Schaumgummi-Binde Zum Zuschneiden von U- und L-Stücken (Innenseite anschrägen) für die Auspolsterung und Druckerhöhung am Malleolus. Des Weiteren als Grundmaterial zur Anfertigung von Schneiderpacks (Spaghetti oder Noppen) zur örtlichen Gewebelockerung.						
10 cm x 1 m Stärke 1 cm	10 cm x 1 m Stärke 1 cm	10 cm x 1 m Stärke 1 cm	10 cm x 1 m Stärke 1 cm	8 cm x 1 m Stärke 0,5 cm	10 cm x 1 m Stärke 1 cm	
(1 x)	(1 x)	(1x)	(1x)	(1x)	(1x)	
Cellona® Synthetikwatte Polster unter dem Kompressionsverband zur gleichmäßigen Druckverteilung sowie zur Verhinderung von Abschnürungen und Druckstellen. 6 cm x 3 m (8x) 10 cm x 3 m (8x) 6 cm x 3 m (4x) 6 cm x 3 m (4x)						
	15 cm x 3 m (8x)	10 cm x 3 m (4x)	10 cm x 3 m (4x)			
Rosidal® soft Hautfreundliche und luftdurchlässige Schaumstoffbinde zur Polsterung unter dem Kompressionsverband. Verhindert das Rutschen des Verbandes.						
				10 cm x 2,5 m Stärke 0,3 cm (2x)	10 cm x 2,5 m Stärke 0,3 cm (3x)	
				15 cm x 2,5 m Stärke 0,4 cm (2x)	15 cm x 2,5 m Stärke 0,4 cm (3x)	
Rosidal® K Binde Kräftig komprimierende Kurzzugbinde aus 100 % Baumwolle zur kräftigen Kompression in der lymphologischen Therapie.						
6 cm x 5 m (2x)	6 cm x 5 m (2x)	6 cm x 5 m (2x)	6 cm x 5 m (2x)	6 cm x 5 m (2x)	6 cm x 5 m (2x)	
8 cm x 5 m (2x) 10 cm x 5 m (2x)	8 cm x 5 m (2x) 10 cm x 5 m (4x)	10 cm x 5 m (2x) 12 cm x 5 m (2x)	10 cm x 5 m (2x) 12 cm x 5 m (3x)	8 cm x 5 m (2x) 10 cm x 5 m (2x)	8 cm x 5 m (2x) 10 cm x 5 m (4x)	
` ,	10 cm x 5 m (4x) 12 cm x 5 m (6x)	12 GH X 5 HI (2X)	12 GH X 5 H (3X)	12 cm x 5 m (2x)	10 cm x 5 m (4x) 12 cm x 5 m (6x)	
Idealbinde Zur kräftigen Kompression und Verbandsstabilisierung im Bereich des Oberschenkels und des Abdomens.						
				20 cm x 5 m (1x)	20 cm x 5 m (2x)	
Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15						