

Nasen-Spray Pflege Dr. Mann®

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig durch – sie enthält wichtige Informationen zur Verwendung des Produkts.

Was ist Nasen-Spray Pflege Dr. Mann®?

Nasen-Spray Pflege Dr. Mann® ist ein befeuchtendes Nasenspray und enthält Natriumhyaluronat 0,2%, eine natürliche Substanz, die in vielen Organen des menschlichen Körpers vorkommt.

Anwendungsbereich

Befeuchtung der Nasenschleimhaut
Nasen-Spray Pflege Dr. Mann® ist zur Befeuchtung der Nasenschleimhaut und Unterstützung der natürlichen Reinigung bestimmt.

Anwendung

Nasen-Spray Pflege Dr. Mann® ist zur täglichen Nasenhygiene ebenso geeignet wie zur Erleichterung bei der Entfernung und Reinigung der Nase von Nasenschleim bei Erkältungen und Allergien.

Nasen-Spray Pflege Dr. Mann® unterstützt die Befeuchtung der Nasenhöhlen sowie der empfindlichen Nasenschleimhaut, die für die Gesunderhaltung des gesamten Atemsystems besonders wichtig ist. Häufig verliert die Nase aufgrund besonderer Umstände ihre natürliche Feuchtigkeit, sie „trocknet aus“. Ursachen können nicht nur trockene Raumluft, Staub, Pollen, Wind oder Kälte sein, sondern auch andere Faktoren wie Erkrankungen und Medikamente, welche die Schleimhäute zusätzlich austrocknen lassen. Zu diesem Beschwerdebild kann es auch infolge von Schnupfen und dessen Behandlung kommen.

Nasen-Spray Pflege Dr. Mann® wird angewendet zur lang anhaltenden Befeuchtung der Nasenschleimhaut, z. B. bei trockener Luft in geheizten oder klimatisierten Räumen, und zur Reinigung der Nasenhöhle, z. B. bei verstärkter Belastung der Luft mit Pollen, Hausstaub oder Rauch oder auch als unterstützende Maßnahme bei Schnupfen.

Mit Nasen-Spray Pflege Dr. Mann® wird die Nasenatmung und Nasenreinigung erleichtert und die Nase zusätzlich lang anhaltend befeuchtet.

Zusammensetzung

Nasen-Spray Pflege Dr. Mann® ist als 15 ml isotonische Lösung, entsprechend ca. 100 Sprühstößen, erhältlich. 1 ml enthält Natriumhyaluronat 0,2%; Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat; Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat; Natriumchlorid; Kaliumchlorid; Wasser für Injektionszwecke. Ohne Konservierungsmittel.

Wie oft soll Nasen-Spray Pflege Dr. Mann® angewendet werden?

In den meisten Fällen ist eine dreimal tägliche Anwendung von 1 bis 2 Sprühstößen Nasen-Spray Pflege Dr. Mann® in jedes Nasenloch ausreichend. Die Anwendung kann je nach Bedarf aber auch häufiger erfolgen. Es besteht keine Beschränkung der Anwendungsdauer.


Hinweise zur Anwendung von Nasen-Spray Pflege Dr. Mann®:



Nehmen Sie vor dem Gebrauch bitte die Schutzkappe ab.



Betätigen Sie vor der ersten Anwendung mehrmals die Pumpe bis zum Austritt der Lösung (in der Regel 1- bis 2-mal). Danach ist das System für jede weitere Anwendung gebrauchsfertig.

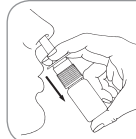

Führen Sie die Sprühöffnung in jedes Nasenloch ein und pumpen Sie. Atmen Sie dabei leicht durch die Nase ein.

Vorsicht

In seltenen Fällen kann dieses Produkt Überempfindlichkeitsreaktionen wie zum Beispiel lokale allergische Reaktionen auslösen. In solchen Fällen ist die Anwendung des Produkts zu beenden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie überempfindlich gegen einen der Inhaltsstoffe sind.

Wichtige Informationen zur Anwendung von Nasen-Spray Pflege Dr. Mann®

- Aus hygienischen Gründen sollte die Flaschenspitze nach jeder Anwendung mit einem sauberen Tuch abgewischt und mit der Schutzkappe wieder verschlossen werden.
- Zur Vermeidung von eventuellen Infektionsübertragungen sollte jede Sprayflasche nur von einer Person benutzt werden.
- Verwenden Sie Nasen-Spray Pflege Dr. Mann® nicht nach dem Verwendbarkeitsdatum.
- Nach Anbruch soll Nasen-Spray Pflege Dr. Mann® nicht länger als 6 Wochen verwendet werden.

- Achten Sie darauf, heftige Stöße mit der Flaschenspitze an die Nasenwand zu vermeiden. Verwenden Sie das Produkt nur in einer ruhigen Umgebung.
- Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die Flasche unbeschädigt ist. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Flasche beschädigt ist.

Lagerung

Es sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Weitere Informationen zu Nasen-Spray Pflege Dr. Mann®

Wie die Nase unsere Atemwege schützt:

Unsere Nase kann viel mehr als nur gute von schlechten Gerüchen unterscheiden. Sie befeuchtet, reinigt und erwärmt täglich ca. 10 000 Liter Atemluft, bevor diese in die Lunge gelangt, und schafft dadurch ein optimales Klima in unseren Atemwegen. Die wichtigsten Aufgaben, die Reinigung und Befeuchtung, übernimmt dabei die Nasenschleimhaut. Sie kleidet den gesamten Innenraum der Nasenhöhlen aus und ist mit einem schleimigen, schützenden Sekret überzogen. An dieser klebrigen Oberfläche bleiben die meisten eingeatmeten Schmutzpartikel, Allergene, Bakterien und Viren haften. Die kleinen beweglichen Flimmerhärchen auf der Oberfläche der Nasenschleimhaut sorgen für deren Abtransport. Die Aufrechterhaltung einer gut funktionierenden Nasenschleimhaut ist für unser tägliches Wohlbefinden von sehr großer Bedeutung. Immer mehr Menschen leiden unter dem Gefühl der „trockenen Nase“.

Wenn die Nase trocken ist:







Überall lauern Gefahren für empfindliche Nasen: Heizungsluft im Winter und Klimaanlage im Sommer trocknen die Atemluft aus. In Räumen greifen Staub, Rauch und andere Partikel, im Freien zusätzlich Pollen und Abgase unsere Nase an und können zur Beeinträchtigung der Funktion der Schleimhaut führen. Ein zu dünnflüssiges Sekret kann die Schutzwirkung beeinträchtigen. Ein zu dickflüssiges Sekret kann den Abtransport der Partikel und Krankheitserreger verlangsamen; es bilden sich Borken und Krusten, Flimmerhärchen verkleben und die Schleimhaut trocknet aus. Auch während der Schnupfenzeit, wenn die Schleimhaut durch abschwellend wirkendes Nasenspray gereizt ist, kann die Nase ihre Funktion nicht mehr uneingeschränkt ausüben und sich erfolgreich gegen Erreger wehren.

Was tut der Nase gut?

Nasen-Spray Pflege Dr. Mann® enthält Hyaluronat, eine natürliche Substanz, die in vielen Organen des menschlichen Körpers vorkommt. Durch ein sehr hohes Wasserbindungsvermögen bildet Hyaluronat einen lang anhaltenden Flüssigkeitsfilm auf der Nasenschleimhaut und sorgt somit für eine gleichmäßige Befeuchtung.

Nasen-Spray Pflege Dr. Mann® befeuchtet trockene und beruhigt gereizte Nasen und unterstützt deren Reinigungsprozess. Nasen-Spray Pflege Dr. Mann® enthält kein Treibgas und keine Konservierungsmittel.

Symbole

Symbol	Bezeichnung
	Das Produkt nicht verwenden, wenn die Flasche beschädigt ist.
	Nicht länger als 1,5 Monate nach Anbruch verwenden.
	Gebrauchsanweisung beachten
	Verwendbar bis
	Chargennummer
	Hersteller



Hersteller

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH
(ein Unternehmen von Bausch + Lomb)
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin, Deutschland
kontakt@bausch.com

BAUSCH + LOMB

Nasen-Spray Pflege Dr. Mann, 06-2014

®/™ sind Marken von Bausch & Lomb Incorporated oder deren Tochtergesellschaften
© Bausch & Lomb Incorporated

85121PB766/2-DE