

PARI SINUS

Contra Sinusitis



Der PARI SINUS, das neuartige Inhalationsgerät

- Pulsierendes Aerosol für Nase und Nasennebenhöhlen
- Bei Sinusitis, Rhinosinusitis, Sinubronchitis

Spezialisten für effektive Inhalation





PARI SINUS

Pulsierendes Aerosol für die Nasennebenhöhlen

Bei der Behandlung von Sinusitis, Rhinosinusitis und Sinubronchitis kommt der Inhalationstherapie eine ganz besondere Bedeutung zu. Zusätzlich zu den bekannten Vorteilen der Aerosoltherapie nutzt der **PARI SINUS** den positiven Effekt einer alternierenden Druckwelle zur Deposition von Aerosolen in den Nasennebenhöhlen. Denn vibrierende Aerosole gelangen wesentlich leichter über die Ostien in die Nasennebenhöhlen als herkömmliche Aerosole und bringen die Medikamente direkt an den Ort, an dem sie wirken sollen.



PARI SINUS

mit PARI LC SPRINT® SINUS Vernebler

Bestell-Nr. 028G1000

Hilfsmittel-Nr. 14.24.02.0011

PZN 0823925

Aerosolcharakteristika:

Orange Düsenaufsatz

Total Output Rate: 220 mg/min

MMD: 3,2 µm
(Medianer Massendurchmesser)

Massenanteil unter 5 µm: 71%

Messung mit dem Malvern Spraytec (berechnet nach Fraunhofer-Mie Modell) bei 23°C und 50% relativer Feuchte.
Vernebeltes Medium: 0,9 % NaCl (5 ml). Jet Flow 4,6 l/min

Indikationen:

Bei Erkrankungen der Atemwege wie z.B.

- Akuten und chronischen Sinusitiden (allergisch, viral, bakteriell)
- Rhinosinusitis
- Sinubronchitis
- nach operativen Eingriff

Substanzen, die für die Inhalationstherapie mit PARI SINUS eingesetzt werden können:


- NaCl-Lösung, physiologisch oder hyperton
- Sole-Lösungen
- Sekretolytische und muko-aktive Substanzen
- Antibiotika
- Kortikosteroide

Zusätzliche Vorteile der Feuchtinhalation:

- Befeuchtung der Schleimhaut von Nase und Nasennebenhöhlen
- Regeneration des Zilieneithels, Verbesserung der mukoziliären Clearance

PARI SINUS – mit zusätzlichen PARI-Verneblern auch für weitere Atemwegserkrankungen einsetzbar

- Der **PARI SINUS** Kompressor ist auch zur Therapie von Erkrankungen der unteren Atemwege hervorragend geeignet
- Dazu werden die optional erhältlichen Vernebler aus der PARI LC SPRINT-Familie verwendet
- **PARI SINUS** – das universelle Inhalationssystem für ein weites Spektrum von Atemwegserkrankungen

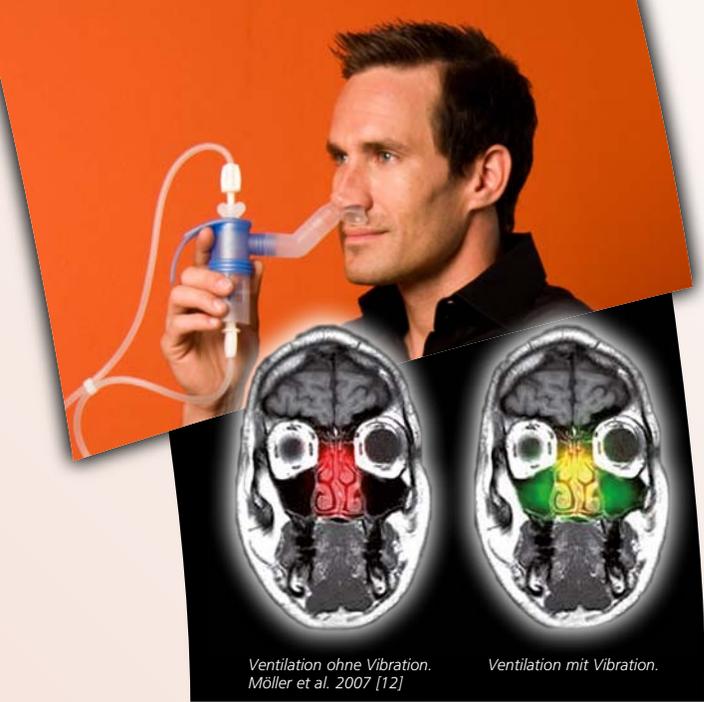

PARI Service Center

+49 (0) 8151 279-279

Rufen Sie uns an...

... wenn Sie Fragen zur Verwendung, Handhabung, Reinigung oder Wartung Ihres PARI Inhalationsgerätes haben.

... wenn Sie Auskünfte über Ersatzteile von aktuellen bzw. älteren PARI Produkten benötigen und/oder wissen möchten, wo Sie diese bestellen können.

... wenn Ihr PARI Produkt Service oder Reparatur benötigt.

Mit dem PARI 48-Stunden-Reparaturservice verlässt Ihr Gerät unsere Service-Abteilung innerhalb von 48 Stunden.

... wenn Sie ein Leihgerät für die Dauer der Reparatur Ihres PARI Inhalationsgerätes oder für Ihren Urlaubsaufenthalt im Ausland benötigen.

PARI SINUS

Die wichtigsten Merkmale:

- Vibrierendes Aerosol zur Therapie von Sinusitis, Rhinosinusitis, Sinubronchitis
- Schonende, schmerzfreie Therapie-Option
- Direktes Erreichen der Nasennebenhöhlen durch das pulsierende Aerosol

Informationen zum **PARI SINUS** erhalten Sie in der Apotheke, im Sanitätshaus, im medizinisch-technischen Fachhandel oder direkt bei **PARI**.

PARI Service Center: 08151 / 279-279
oder unter **www.pari.de**

PARI GmbH
Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstraße 3 · 82319 Starnberg
Telefon +49 (0) 8151 279-0
Fax +49 (0) 8151 279-101

Im Internet finden Sie PARI unter:
E-Mail: info@pari.de
www.pari.de

PARI Fachhandel: