

PeriGel®

Gingiva-Gel auf Hydeal-D® Basis



Eine Parodontitis führt häufig zur Bildung von Zahnfleischtaschen, in denen sich das Zahnfleisch von den Zähnen löst. Übliches Zähneputzen kann diese Taschen nicht wirksam reinigen, wodurch es hier in der Folge zur Ansammlung von plaquebildenden Bakterien kommt, die wiederum dazu führt, dass sich die Tasche nicht auf natürliche Weise schließen kann. Die professionelle Zahnreinigung hat das Ziel, mit einer tiefen mechanisch durchgeführten Reinigung die Plaque in der Tasche zu entfernen. Dank langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Biomaterialien konnte die Firma Fidia Farmaceutici S.p.A. ihre exklusiven PeriGel® Formulierungen entwickeln. Das verwendete Biomaterial ist Hydeal-D® (ein Derivat der natürlichen Hyaluronsäure) mit den Merkmalen der Biokompatibilität und Biointeraktivität, die typisch sind für die in Geweben natürlich vorkommenden Moleküle und damit Freiheit von Nebenwirkungen garantieren. Da das Produkt am Zahnfleisch haftet, wirkt es der Plaquebildung entgegen und begünstigt den Rückgang der Zahnfleischtaschen.

Anwendungsgebiete

Gel zur unterstützenden Behandlung von entzündlichen Gingivaveränderungen aufgrund einer Parodontalerkrankung (wie Gingivitis, Zahnfleischbluten, Zahnfleischtaschen, Gingivarezession) oder eines Traumas (wie nach Ultraschallreinigung, Abrasionen, Zahnextraktionen oder nach Eingriffen an der Schleimhaut), d.h. in Situationen, in denen die Gingiva hochkonzentrierte Hyaluronsäure benötigt.

Anwendungshinweise

1. Zähne gründlich putzen
2. Etwa ½ cm des Gels auf das Zahnfleisch und die Mundschleimhaut auftragen und 2-3 Minuten lang sanft einreiben.
3. Überschüssiges Gel mit Wasser abspülen.

Häufigkeit der Anwendung

Das Produkt sollte nach jeder Mundreinigung (Zähneputzen, Mundspülung usw.) oder gemäß den Anweisungen des Zahnarztes angewendet werden.

Gegenanzeigen

Nachgewiesene Überempfindlichkeit des Patienten gegenüber dem Produkt.

Allgemeine Hinweise

- Das Produkt nicht nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Haltbarkeitsdatums verwenden.
- Bei Packungsschäden das Produkt nicht anwenden und mit Merz Dental GmbH Kontakt aufnehmen.
- Leeren Behälter nicht unkontrolliert entsorgen
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Kühl und trocken lagern (< 40 °C)

Packungseinheit

1 Tube mit 15 ml Gel

Hydeal-D® ist ein Warenzeichen von Fidia Farmaceutici S.p.A.

Vertrieb:

Merz Dental GmbH

Eetzweg 20 · D - 24321 Lütjenburg

Telefon +49(0)4381/403-0

Hersteller:

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica 3/A

I - 35031 Abano Terme (PD) Italy

