

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinprodukts beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsanweisung

Rhino-orthim®

Nasenspray

Isotonische Kochsalzlösung mit weiteren Mineralstoffen frei von Konservierungsmitteln

Zusammensetzung

Rhino-orthim® Nasenspray ist ein Medizinprodukt und enthält eine isotonische Kochsalzlösung (0,9%ige Natriumchloridlösung) mit weiteren Mineralstoffen in geringer Konzentration (Calcium phosphoricum, Ferrum phosphoricum, Kalium chloratum, Kalium sulfuricum, Magnesium phosphoricum).

Sonstige Bestandteile

Keine

Hinweis

Rhino-orthim® Nasenspray ist mit einem besonderen Sprühsystem ausgestattet. Dadurch ist es möglich, das Präparat ohne Konservierungsmittel herzustellen.

Rhino-orthim® Nasenspray ist deshalb besonders zur Anwendung bei gereizter und empfindlicher Nasenschleimhaut und auch für die Langzeitanwendung geeignet.

Dosierspray zum Einsprühen in die Nase

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 15 ml Lösung (Dosierspray)

Anwendungsgebiete

Zur unterstützenden Behandlung bei verstopfter Nase und zur Reinigung und Befeuchtung der Nasenschleimhaut.

Gegenanzeigen, Wechselwirkungen und Nebenwirkungen

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch von Rhino-orthim® Nasenspray sind keine Gegenanzeigen, Wechselwirkungen oder Nebenwirkungen bekannt.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Rhino-orthim® Nasenspray kann während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die nachfolgende Dosierungsanleitung gilt als Empfehlung; die Menge und die Häufigkeit der Anwendung kann nach individuellen Gesichtspunkten geändert werden.

Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Rhino-orthim® Nasenspray anwenden?

Säuglinge und Kleinkinder unter 2 Jahren: Je nach Bedarf mehrmals täglich 1 Sprühstoß in jede Nasenöffnung einbringen.

Kinder über 2 Jahre und Erwachsene:

Je nach Bedarf mehrmals täglich 1 bis 2 Sprühstöße in jede Nasenöffnung einbringen (1 Sprühstoß = 0,14 ml).

Wie sollten Sie Rhino-orthim® Nasenspray anwenden?

Schutzkappe abnehmen. Vor der ersten Anwendung bis zum Austreten eines gleichmäßigen Sprühnebels mehrmals die Sprühhvorrichtung betätigen. Bei weiteren Anwendungen ist das Dosierspray sofort gebrauchsfertig. Den Sprühkopf jeweils in das betreffende Nasenloch einführen und einmal pumpen. Während des Sprühvorgangs leicht durch die Nase einatmen. Dosiersprayflasche möglichst senkrecht halten. Nicht waagrecht oder nach unten sprühen. Aus hygienischen Gründen den Sprühkopf nach jeder Anwendung abwischen und die Schutzkappe wieder aufsetzen.

Wie lange dürfen Sie Rhino-orthim® Nasenspray anwenden?

Die Anwendung von Rhino-orthim® Nasenspray ist für eine Dauer von bis zu 30 Tagen vorgesehen. Wenn nach 14-tägiger Behandlung keine Besserung eingetreten ist, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker befragen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit

Das Verfallsdatum von Rhino-orthim® Nasenspray ist auf der Verpackung aufgedruckt. Verwenden Sie Rhino-orthim® Nasenspray nicht mehr nach diesem Datum!

Nach Anbruch sollte Rhino-orthim® Nasenspray nicht länger als 12 Wochen verwendet werden.

Wie ist Rhino-orthim® Nasenspray aufzubewahren?

Rhino-orthim® Nasenspray Dosierspray nicht über 25 °C lagern! Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand der Information

Mai 2010

Hersteller des Medizinproduktes:

orthim KG, Otto-Hahn-Straße 17-19, 33442 Herzebrock-Clarholz

Weiterführende Informationen zu Rhino-orthim® Nasenspray

Mineralsalze werden in der Medizin schon lange zur Linderung von Krankheiten eingesetzt. In Kurorten wird in sogenannten Gradierwerken salzhaltige Sole aus natürlichen Quellen über ein Gerüst aus Reisigwänden geleitet und dadurch fein zerstäubt. Das hilft zur Gesundung der Nasenschleimhaut und verschafft besonders Menschen mit Atemwegserkrankungen eine häufig sofort spürbare Linderung. In ähnlicher Weise wie die salzhaltige Luft können die in Rhino-orthim® Nasenspray enthaltenen Mineralsalze gezielt in der Nase ihre Wirksamkeit entfalten. Die Wirkung der physiologischen Kochsalzlösung in Rhino-orthim® Nasenspray wird durch weitere Mineralsalze, die dem Präparat in geringer Konzentration beigegeben sind, in idealer Weise ergänzt. Rhino-orthim® Nasenspray ist besonders gut verträglich und kann daher auch über einen längeren Zeitraum angewendet werden.

Bei Schnupfen ist die Nasenschleimhaut besonders gereizt. Die Folge ist eine laufende und verstopfte Nase. Rhino-orthim® Nasenspray hilft der Schleimhaut sich schneller zu regenerieren und erleichtert die Nasenreinigung auf natürliche Weise. Die gereizte Nasenschleimhaut wird durch Rhino-orthim® Nasenspray befeuchtet. Damit wird die Reizwirkung auf die Nasenschleimhaut spürbar vermindert. Rhino-orthim® Nasenspray kann in Ergänzung zu herkömmlichen Schnupfenmitteln genommen werden, es kann aber auch - besonders für Säuglinge und Kleinkinder - als alleiniges Mittel für die milde Behandlung von Schnupfen eingesetzt werden.

Nicht nur bei Schnupfen leidet die Nasenschleimhaut. Z. B. durch trockene Luft in überheizten Räumen und durch Klimaanlageanlagen, durch Tabakrauch oder andere störende Umwelteinflüsse können die Schleimhäute der Atemwege, insbesondere die Nasenschleimhaut, gereizt werden. Rhino-orthim® Nasenspray schützt in diesen Fällen vor Austrocknung und hilft, die Funktionsfähigkeit der Nase zu erhalten. Rhino-orthim® Nasenspray enthält keine Konservierungsstoffe.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu Rhino-orthim® Nasenspray haben, schreiben Sie uns:

orthim KG

Otto-Hahn-Straße 17-19
33442 Herzebrock-Clarholz
Fon: 0 52 45 | 9 20 10 - 0
Fax: 0 52 45 | 9 20 10 - 66
eMail: info@orthim.com
www.orthim.com

