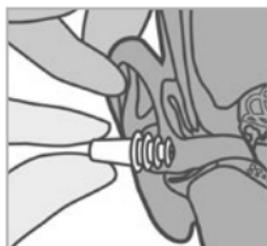


**D** GebrauchsinformationenSANOHRA *noise* für ErwachseneSANOHRA *noise* für Kinder und Erwachsene mit kleinen Gehörgängen**SANOHRA *noise* schützt das Trommelfell vor starkem Lärm**

Beim Heimwerken, beim Motorsport, auf Partys oder beim Konzert geht es oftmals lauter zu, als es dem Ohr gut tut. Für Spaß und Freude ohne gesundheitliche Risiken wurden SANOHRA *noise* Ohrstöpsel entwickelt. Ein spezielles Filterelement sorgt dafür, dass der Geräuschpegel bei verschiedenen Frequenzen sehr gleichmäßig gedämmt wird. So wird das empfindliche Sinnesorgan Ohr geschützt und Geräusche und Musik können trotzdem unverfälscht wahrgenommen werden. Damit Sie Ihre Ohren wirksam schützen können haben wir einen speziellen Ohrenschutz entwickelt, der folgende Eigenschaften aufweist:

- ✓ **Lärmschutz für Arbeit, Sport und Party**
- ✓ **Gleichmäßige Lärmdämmung bei allen Frequenzen**
- ✓ **Leicht einsetzbar und angenehm zu tragen**

**Einsetzen von SANOHRA *noise***

Einen Arm über den Kopf führen und den oberen Teil der Ohrmuschel des auf der anderen Kopfseite befindlichen Ohres leicht anzuheben. So wird der Gehörgang geweitet. SANOHRA *noise* am Schaft zwischen Daumen und Zeigefinger der anderen Hand fassen und mit leichter Drehbewegung mit den Lamellen voran in den Gehörgang einsetzen. Bei dem anderen Ohr genau so verfahren.

**Kinder dürfen den Ohrenschutz nur unter Anleitung von Erwachsenen benutzen. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet (Gefahr des Verschluckens).** Bei Entzündungen des Ohres, Läsionen des Trommelfells oder dem Einsatz eines Paukenröhrchen fragen Sie zuvor den behandelnden Arzt.

**Herausnehmen von SANOHRA *noise***

Vor dem Herausnehmen die Ohrmuschel wie beschrieben leicht anheben. Den Ohrenschutz **nicht ruckartig herausziehen** sondern langsam mit einer leichten Drehbewegung entfernen.

**Warnhinweise zur Verwendung von SANOHRA *noise***

**Achtung:** Bei Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise und Einsetzanleitung kann die Schutzwirkung von SANOHRA *noise* gegen Lärm erheblich beeinträchtigt werden. Gehörschutzstöpsel sollten in Lärmbereichen ohne Unterbrechung getragen werden.

SANOHRA *noise* kann bei sachgemäßer Pflege wieder verwendet werden. Zur Reinigung kann das Produkt mit mildem Reinigungsmitteln (Seife) gereinigt werden. In regelmäßigen Abständen bitte das Produkt auf Beschädigungen prüfen und gegebenenfalls ersetzen. Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Weitere Angaben sollten beim Hersteller angefordert werden. Es wird empfohlen SANOHRA *noise* nach Gebrauch wieder in dem mitgelieferten Döschen aufzubewahren. Es sollte dabei kühl und trocken gelagert werden. Alle Teile der Gehörschutzstöpsel sind so konstruiert und produziert, dass sie unter Beachtung der Gebrauchsanweisung beim Tragen keine Verletzungen verursachen.

**Warnung:** Diese Gehörschutzstöpsel liegen im Größenbereich Klein oder Größenbereich Groß. Gehörschutzstöpsel nach EN 352-2 werden im Mittleren Größenbereich, dem Größenbereich Klein und dem Größenbereich Groß angeboten. Gehörschutzstöpsel des Mittleren Größenbereiches passen der großen Mehrheit der Benutzer. Gehörschutzstöpsel des Größenbereiches Klein oder Groß sind für Benutzer vorgesehen, für die Gehörschutzstöpsel des Mittleren Größenbereiches nicht geeignet sind.

**Daten der Dämmwirkung**

Schalldämmung: SNR = 23 dB, H = 23 dB, M = 22 dB, L = 21 dB

Frequenz [Hz]	Schalldämmung [dB]	Standard Abweichungen [dB]	APV [dB]
63	23,2	3,3	19,9
125	26,2	6,0	20,2
250	23,5	4,7	18,8
500	25,5	5,4	20,1
1000	26,7	4,4	22,3
2000	31,2	5,0	26,2
4000	25,4	4,6	20,8
8000	29,6	9,1	20,5

Entspricht der europäischen Richtlinie für persönliche Schutzausrüstung (CE) 89/686EWG, EN352-2:2002, EN24869-1.