




Suprasorb® G

Gel-Verbände

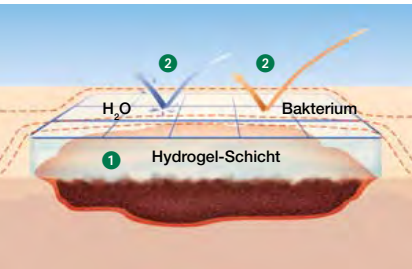

- ① schonende Auflösung von trockenen Nekrosen durch die Hydrogel-Schicht
- ② bakterien- und flüssigkeitsabweisende Polyurethanfolie (Gel-Kompresse)

Anwendungsbereiche

- nekrotische und schwach exsudierende Wunden
- oberflächliche (Kompresse) bzw. tiefe (amorphes Gel) Wunden
- nicht infizierte Wunden
- in allen Phasen der Wundheilung, z. B.:
 - Ulzera verschiedener Genese
 - Verbrennungen 2. Grades
 - postoperative Wunden

Eigenschaften

- löst Nekrosen gewebeschonend
- spendet Feuchtigkeit
- komfortable Anwendung durch einzigartige Applikationsspritze (amorphes Gel)
- sehr gute Wundkontrolle durch transparente Folie (Gel-Kompresse)

Hinweise

- nicht über den Wundrand hinaus applizieren
- kann bei Bedarf auf die Wundfläche zugeschnitten werden
- Verbandwechselintervall:
 - Suprasorb G Gel-Kompresse
 - bei Erschöpfung des Feuchtigkeitsreservoirs (leichte Eintrübung erscheint), spätestens nach 5-7 Tagen
 - Suprasorb G, Amorphes Gel
 - abhängig vom Sekundärverband, spätestens nach 3 Tagen

Ausführungen

- Gel-Kompresse
- Amorphes Gel

Tipp

- kann mit folgenden Primär- und Sekundärverbänden kombiniert werden, z. B.: Suprasorb F, Suprasorb C und Suprasorb H dünn

Suprasorb® G Amorphes Gel in Applikationsspritze steril

Größe (g, Spritze)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
6	121 913	740 267 0	8 / 480	SSB, EV
20	20 479	160 063 0	10 / 240	SSB, EV

Suprasorb® G Gel-Kompresse steril, einzeln eingeschweißt

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
5 x 7,5	20 470	043 306 4	5 / 25	SSB, EV
10 x 10	20 471	043 307 0	5 / 25	SSB, EV
20 x 20	20 472	043 308 7	3 / 15	SSB, EV

Erläuterung Verordnung- und Erstattungshinweise siehe S. 15