




Lohmann &amp; Rauscher

# Suprasorb® H

## Hydrokolloid-Verband

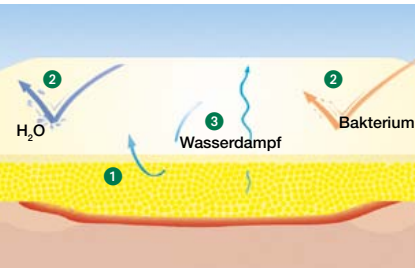

- 1 bei Exsudataufnahme quillt das Hydrokolloid und bildet ein Gel, das Exsudat und Gewebetrümmer bindet.
- 2 bakterien- und flüssigkeitsabweisend
- 3 überschüssiger Wasserdampf verdunstet

### Anwendungsbereiche

- mittel exsudierende Wunden (Suprasorb H standard, sacrum, border)
- schwach exsudierende Wunden (Suprasorb H dünn)
- oberflächliche Wunden
- nicht infizierte Wunden
- in allen Phasen der Wundheilung z. B.:
  - Ulzera verschiedener Genese
  - Verbrennungen 2. Grades
  - Spalthautentnahmestellen
  - postoperative Wunden

### Eigenschaften

- sehr gute Wundheilung durch gutes Exsudatmanagement
- hoher Komfort durch einfache Applikation
- besonders dünn und flexibel
- bakterien- und flüssigkeitsabweisend
- Duschen ist möglich

### Hinweise

Verbandwechselintervall:

- wird durch den behandelnden Arzt je nach Wundzustand, Exsudationsgrad und möglichem Primärverband festgelegt, spätestens nach 5 - 7 Tagen
- bei ausgeprägter Blasenbildung über die Wundfläche hinaus

### Ausführungen

- standard
- dünn
- sacrum
- border

### Tipps

- kann mit folgenden Primärverbänden kombiniert werden, z. B.: Suprasorb A, Suprasorb C und Suprasorb G
- Suprasorb H dünn, 5 x 5 cm ist besonders zur Versorgung des Diabetischen Fußsyndroms geeignet

**Suprasorb® H** Hydrokolloid-Verband steril, einzeln eingeschleht

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
<b>standard</b>				
10 x 10	121 912	740 255 2	8 / 528	SSB, EV
15 x 15	20 401	043 267 9	5 / 50	SSB, EV
20 x 20	20 402	043 282 8	5 / 50	SSB, EV
<b>dünn</b>				
5 x 5	20 424	022 665 5	10 / 1650	SSB, EV
5 x 10	121 910	740 251 7	8 / 384	SSB, EV
5 x 20	20 411	043 284 0	10 / 250	SSB, EV
10 x 10	121 911	740 252 3	8 / 576	SSB, EV
15 x 15	20 413	043 286 3	5 / 50	SSB, EV
20 x 20	20 414	043 288 6	5 / 50	SSB, EV
<b>sacrum</b>				
14 x 16	20 430	043 290 0	5 / 200	EV
<b>border</b>				
14 x 14	20 420	043 289 2	5 / 200	EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15