

Einfache Anwendung



[TEXTUS] balance® zur Fortführung der feuchten Wundbehandlung bei infektfreien, granulierenden Wunden.

[TEXTUS] balance® mit der geglätteten Seite auf die Wunde bringen. Bei Bedarf zuschneiden.

Je nach Exsudatstand [TEXTUS] balance® befeuchten. Je trockener die Wunde, desto mehr Anfeuchtung.

Bei sehr nassen Wunden [TEXTUS] balance® trocken aufbringen. Faser saugt vertikal und ermöglicht guten Wundrandschutz.

Bei Bedarf [TEXTUS] balance® mit trockener Kompresse abdecken und dann mit [TEXTUS] biofix® luftdurchlässig und keimdicht verschließen. Nächster Verbandwechsel nach spätestens 72 Stunden.

Indikationen

Schwer heilende Wunden mit keiner / mäßiger Exsudation (hydriert anwenden) ... starker Exsudation (trocken anwenden)

ab geringem Restbelag	+++	+++
infektfrei	+++	+++

Kombinierbarkeit

Wundrandschutz: [TEXTUS] balance® kann grundsätzlich mit allen gängigen Mitteln zum Wundrandschutz kombiniert werden, wie z.B. mit Zinkcreme oder Hautschutzfilmen.

Wundspüllösungen: [TEXTUS] balance® kann grundsätzlich in Kombination mit allen gängigen indifferenten und differenten Wundspüllösungen, wie Ringer-Lösung oder naszierendem Sauerstoff angewendet werden.

(Die Anwendbarkeit von [TEXTUS] balance® mit gängigen Produkten zum Wundrandschutz* und Wundspüllösungen wurden getestet, bewertet und liegen dem Hersteller vor.)
* Bei der Anwendung von [TEXTUS] balance® mit weiteren Produkten bitte auch die Packungsbeilage des jeweiligen Herstellers beachten.

Bestellinformationen

PZN	Größe	Stück/VE
500 514	5 x 5 cm	10
500 516 6	8 x 12 cm	10
500 519 5	10 x 15 cm	10

Quellen

- 1 Wozniak, G., & Wild, T. (2007). Exsudatmanagement. In T. Wild, & J. Auböck, Manual der Wundheilung (S.109-122). Wien: Springer Verlag
- 2 Gibson D, Cullen B, Legerstee R, Harding KG, Schultz G. MMP einfach erklärt. Wounds International 2009; 1 (1)
- 3 Data on file, biocell



biocell Gesellschaft für Biotechnologie mbH
Oberstaat 6
51766 Engelskirchen
Bestellhotline 02263 / 929 17 - 17
Fax 02263 / 929 17 - 10
info@biocell.de
www.biocell.de

Stand: Februar 2013

[TEXTUS] balance®



Im Gleichgewicht zur Abheilung



biofix heal balance bioactiv [TEXTUS] WUNDTHERAPIE MIT SYSTEM

Mit Balance ...

... zu einer natürlichen Selbstheilung

Feuchtigkeitsbalance: spontane Exsudataufnahme

Die Wundheilung ist ein Balanceakt, bei dem es darauf ankommt, das Gleichgewicht zu halten, um sicher an das Ziel zu gelangen. Das (Wund)Gleichgewicht bei granulierenden („sauberen“) Wunden wird maßgeblich dadurch beeinflusst, dass die Wunde auf physiologische Weise feucht gehalten wird¹.

Starker Wundrandschutz

Im Einklang mit der Wundheilung, die von unten nach oben und von außen nach innen verläuft, nimmt [TEXTUS] balance® Exsudat vertikal auf und schützt auf diese Art die Wundränder vor Aufweichung (Mazeration). Eine Kombination mit gängigen Produkten zum Wundrandschutz ist problemlos möglich.

Vielseite Verwendung und Kombinierbarkeit

[TEXTUS] balance® kann sowohl bei feuchten, als auch bei trockenen Wunden angewendet werden. Eine Kombination mit allen gängigen differierten und indifferierten Wundspüllösungen ist möglich. Bei trockenen Wunden ist eine zusätzliche Hydrierung von [TEXTUS] balance® notwendig.




[TEXTUS] balance® ist eine Wundauflage, basierend auf der patentierten Aquafilament® Technology, für „saubere“, granulierende Wunden. Mit einem zweifachen Balance-Effekt, durch Feuchtigkeitsbalance und Proteasenbindung, fördert [TEXTUS] balance® die Selbstheilungskraft des Gewebes.



Komplikationsarme, physiologische Abheilung: Bindung von Elastase, freien Radikalen, Collagenase und MMP9

Elastase, freie Sauerstoff-Radikale (ROS), Collagenase und MMP-9 sind verantwortlich für den Abbau der extrazellulären Matrix und der Wachstumsfaktoren in der chronischen Wunde. Dieser Abbauprozess verhindert bzw. verzögert den Wundverschluss, da ein Ungleichgewicht von Gewebeaufbau und Gewebeabbau gegeben ist².

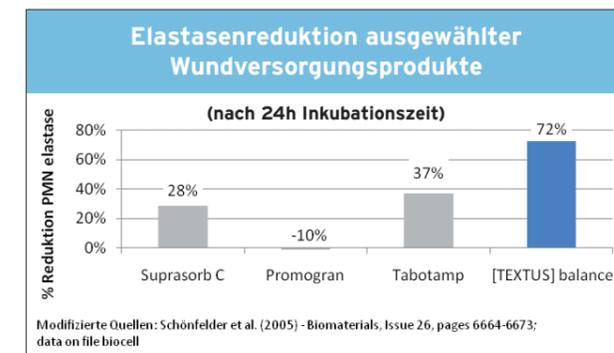

In-vitro Analysen haben gezeigt, dass [TEXTUS] balance® signifikante Mengen an Elastase, ROS, Collagenase und MMP-9 bindet und somit ein ideales Milieu für die Bildung von körpereigenen Wachstumsfaktoren schafft³.


Hohe Bindekapazität und Formstabilität (insb. für Kompressionstherapie)

Durch die superabsorbierenden Aquafilamente in Kombination mit CMC-Cellulose weist [TEXTUS] balance® eine hohe Feuchtigkeitsbindung bei gleichzeitiger Formstabilität auf. [TEXTUS] balance® behält auch bei langfristigem Einsatz stets seine Form, vergelt nicht und ist leicht „in einem Stück“ zu entfernen.


Wundrandschutz durch vertikale Absorption ...



... und Aufnahme hoher Mengen Exsudat

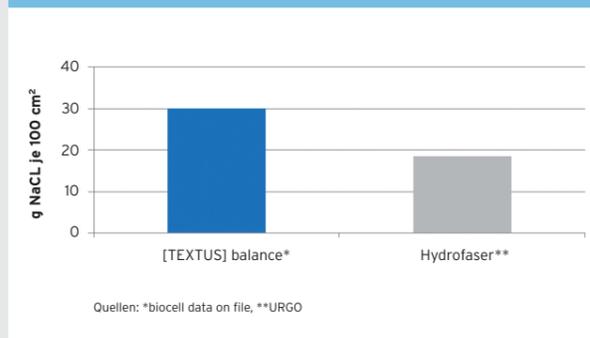

Wirkprinzip [TEXTUS] balance®

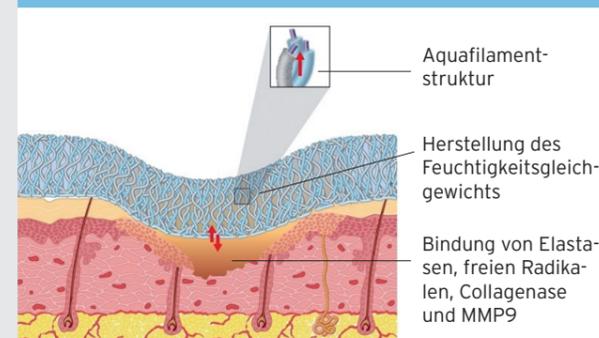

Signifikante Reduktion freier Sauerstoff-Radikaler

